



APLIKAČNÁ POMÔCKA NA OBLIEKANIE ZDRAVOTNÍCKYCH KOMPRESÍVNYCH PANČÚCH S OTVORENOU ŠPIČKOU

Kontraindikácie

- Nekompatibilita s tkaninou
- Otvorené rany, ktoré nie sú zakryté vhodným obvazom

Upozornenie

Poradíte sa so svojím lekárom, ak máte alebo sa u vás vyskytne nasledujúce:

- Mokvajúce dermatózy
- Neliečená lokalizovaná infekcia kože
- Otvorené rany musia byť pred použitím pomôcky na nasadenie riadne zakryté.

Akákoľvek závažná udalosť, ku ktorej došlo v súvislosti s touto pomôckou, by sa mala nahlásiť spoločnosti BSN medical GmbH a príslušnému orgánu vášho štátu.

Zloženie tkaniny

100 % polyester

Pokyny na starostlivosť

Perte pri teplote 40°C, pomôcku nečistite chemicky, nebiel'te, nesusťte v sušičke ani horúcim vzduchom, nežehlite.



Jeden pacient - viacnásobné použitie



Zdravotnícka pomôcka

BSN-JOBST GmbH
Beiersdorfstraße 1
D-46446 Emmerich
am Rhein
www.jobst.com

Navrhnuté v Nemecku
Vyrobené v Thajsku



essity

REF 78463-01

JBR17680.01